

NoizFree Beetle H-2 ST

Förpackningens innehåll:

1. En NOiZFREE Beetle H 2-ST Bluetooth huvudenhet
2. En NOiZFREE Halshänge (halsslinga)
3. En NOiZFREE Telespolebygel (T-hook)
4. Nätladdare
5. Instruktionsbok

Huvudenhet

Bluetooth huvudenhet består av följande funktioner:

- Laddaruttag
- Volymkontrollknapp + (öka) Volymkontroll - (sänka)
- Indikatorlampa På skarvningspluggen
- Mikrofon och Multiknapp ”TALK” (svara-lägg på luren, m.fl. funktioner)
- Halshänget (slingan) i förpackningen kopplas ihop med huvudenhetens 3,5 mm kopplingsplugg.

Halshänget

Bär halshänget runt halsen och ha alltid mikrofonen nära din mun så fångar den upp din röst bättre.

Telespolebygeln (T-hooken) kan användas istället för halshänget.

Prova båda lösningarna och se vilken som ger bästa ljudresultatet och bekvämlighet för dagligt bruk. Placera T-bygeln bakom örat tätt intill hörapparaten. Den lösning som inte används till telefonen kan med fördel användas till annan ljudkälla, t ex radio eller musikavlyssning.

HÖRAPPARATEN

Skall vara ställd i **T**- eller **MT**- läge för mottagning från teleslinga

Laddare och laddning:

Innan enheten används måste batteriet laddas. Använd endast den laddare som finns med i förpackningen. Annan laddare kan skada batteriet.

Laddning:

Anslut laddaren i vägguttag och ladda batteriet minst 2 timmar vid första laddningen. När laddaren ansluts till huvudenheten lyser en röd indikatorlampa. Full laddning kan ta upp till 2 timmar. När laddningen är klar släcks den röda indikatorlampan.

Slå på/av:

För att starta enheten tryck och håll kvar strömbrytaren ”TALK”-knappen (svara-lägg på knappen) på kopplingspluggen i ungefär 3 sekunder, den blå indikatorlampan börjar blinka och det hörs ett kort pip i hörapparaten ställd i T-läge.

För att stänga av:

Tryck och håll inne strömknappen i ungefär 3 sekunder. Du kan höra ett kort pip i hörapparaten och den blå indikatorlampan blinkar snabbt och sedan stängs den av.

INSTRUKTION FÖR PARNING

(ihopkoppling med telefonens bluetooth-funktion)

OBS! Enheten och telefonen måste paras innan det går att ringa.

”Parning” skapar en länk mellan enheter med bluetooth sladdlös teknologi och låter telefonen komma ihåg enhetens unika ID. När enheten och telefonen är parade kopplas enheten automatiskt till telefonen.

Para med enhet och telefon intill varandra. (Enheten och telefonen skall vara fullt laddade.)

1. Tryck in multifunktionsknappen (svara-lägg på luren) tills induktionslampan börjar blinka rött (ca 5 sekunder)
2. Utför enhetssökning från telefonen, referera till telefonens instruktionsbok. När avsökningen är klar visar telefonen att den hittat ”Beetle H-2ST”
3. Välj ”Beetle H-2ST” från telefonens lista på hittade enheter. Låt enheten fortsätta att blinka rött.
4. När telefonen begär bekräftelse med ID-kod slå in koden 0000 (fyra nollor). Enhetens ID är nu sparad i telefonen, parningen är godkänd när enhetens röda indikationslampa blinkar snabbt.
5. Stäng av enheten med multifunktionsknappen. Håll inne knappen tills röd indikation är avstängd.
6. Starta om enheten med tryckning ca 3 sekunder tills blå indikation börjar blinka.

Om knappen hålls inne så länge att röd indikation börjar blinka måste enheten stängas av och startas om på nytt. Röd indikation skall endast användas vid parningstillfället.

Normal användning - Justera volym

För att öka volymen tryck upprepade gånger på övre + knappen. För att minska volymen tryck på - minusknappen.

Ta emot / Avsluta samtal

När det finns inkommande samtal hörs ringsignalen i hörapparaten om den är ställd i T-läge.

Tryck på TALK knappen för att ta emot samtalet. För att avsluta samtalet tryck på TALK knappen.

TALK knappen har också en funktion att ringa senast uppringda samtal genom en kortare tryckning på knappen.

Avancerad användning - Röststyrd uppringning

För att utföra röststyrd uppringning behövs följande steg:

- Tryck kort på ”TALK”-knappen 2 gånger
- Säg det inspelade namnet på er kontakt
- Telefonen kommer att ringa upp den valda kontakten

Avancerad användning - Avvisa samtal

För att avvisa ett samtal behövs följande steg:

- Vid ringsignal från telefonen, håll ”TALK”-knappen nedtryckt och samtalet kommer att avvisas

Avancerad användning - Svara 2:a samtalet

För att ta emot ett andra inkommande samtal behövs följande steg:

- Vid ringsignal från telefonen, håll ”TALK”-knappen nedtryckt
- Första samtalet kommer att placeras i kö
- Andra samtalet kommer att väljas.

Avancerad användning - Lyssna till Radio - Spela Musik

Om mobiltelefonen har radiofunktion går det att lyssna med följande steg:

- När radion är påkopplad på mobilen och inget samtal pågår i telefonen
- Håll ”TALK”-knappen nedtryckt i 3 sekunder och radio kopplas till hörapparaten.
- När telefonen ringer stängs radion automatiskt och återkommer när samtalet avslutas.

Om det finns inspelad musik på mobilen går det att välja spår genom att hålla (+) eller (-) knappen

Felsökning

Om ni försöker ringa ett samtal men kan inte höra något i er hörapparat

Försäkra er om att

- A: Er Beetle är laddad och i ”På” läge (indikatorlampan blinkar blått)
- B: Ni har parat de två enheterna framgångsrikt
- C: Ni har kopplat de två enheterna framgångsrikt
- D: Ni har placerat slingan runt halsen eller bygeln i rätt läge bakom örat
- E: Ni har knäppt på hörapparaten till ”T” eller ”MT” läge
- F: Ni har ökat volymen på Beetle genom att trycka på ”+” knappen som är placerad på huvudenheten

OFF	Ström av
ON	Kontinuerligt i parningsläge
10 snabba blinkningar	Parning framgångsrikt
Pulser var 3:e sekund	Standby-läge (inte i samtal)
Puls var 8:e sekund	Uppkopplad

Normalläge - användning Ljudsignaler Indikeringar

En hög ton när volymknappen trycks in	Volymen har nått maximal eller minimal nivå
5 snabba höga toner upprepade var 20:e sekund	Låg batteri nivå
Inga ljudindikationer försämrad ljudkvalitet	Utanför räckvidd ca 10 meter
Serie av 4 signaler (hög till låg ton)	Aktivt samtal
Ringsignal	Inkommande samtal
En hög signal	Parning bekräftad
En låg signal	Starta röstaktivering
En hög signal	Samtal slut