


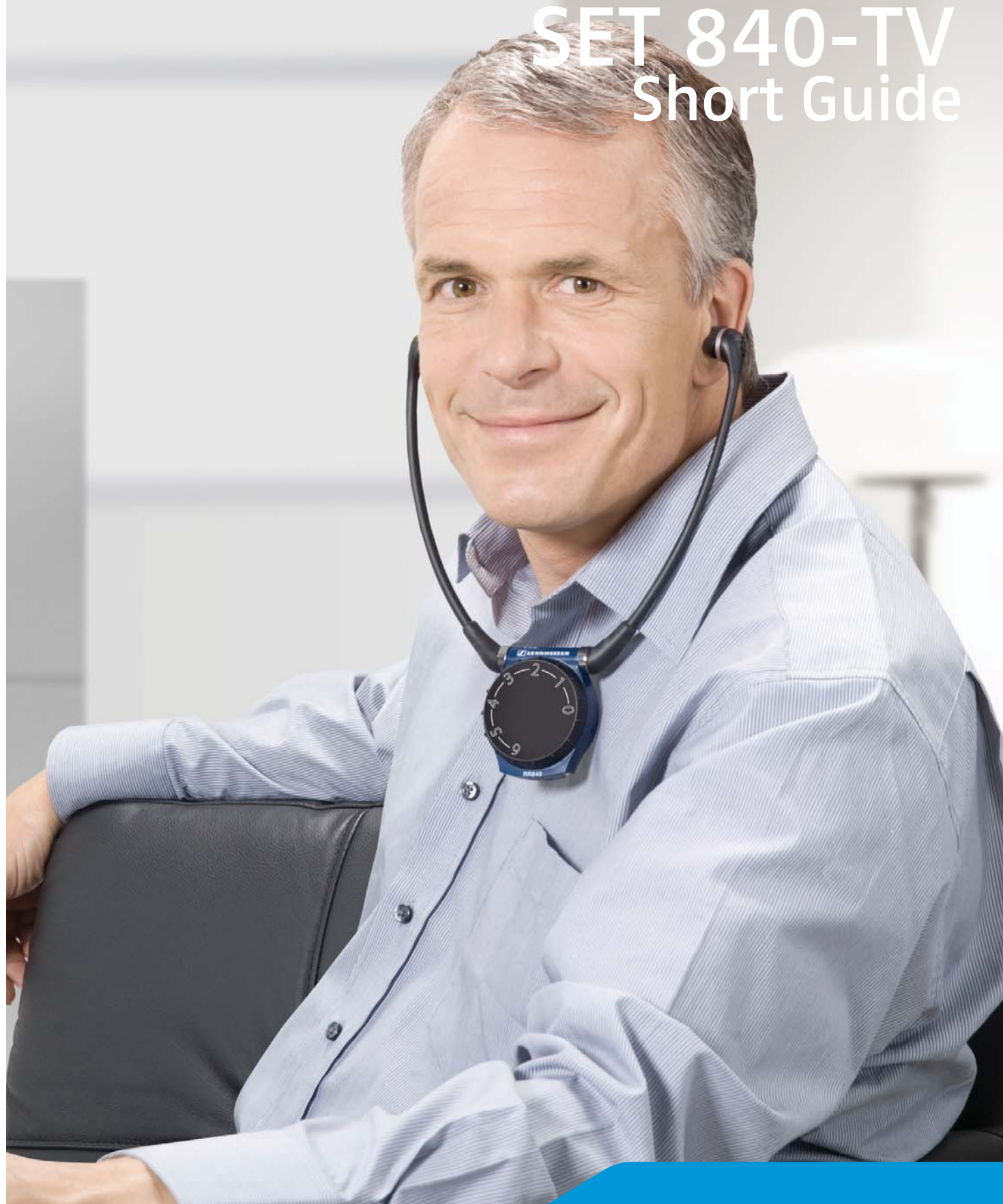

# SET 840-TV

## Short Guide



## Gratulerar till ditt nya trådlösa Set 840-TV från Sennheiser!

Den här snabbguiden är tänkt att underlätta för dig, när du ska börja använda ditt nya trådlösa set för TV.

Packa upp all utrustning och lägg den framför dig. Förpackningen ska innehålla en röd och svart sändare/laddningsenhet (med ett integrerat fack för laddning av extrabatteri på ena sidan), en "stetoset"-mottagare (används som ett stetoskop hängande i öronen), diverse adaptrar, anslutningskablar etc., två olika par öronproppar (de kanske passar bättre än de som redan sitter på stetosetet). Kontrollera för säkerhets skull listan i den bifogade handboken "*Wireless TV listening system Set 840-TV*" sidan 4 "*Delivery includes*".

Systemet är baserat på radioteknologi. Av den anledningen behöver inte sändare och mottagare placeras i samma rum. Undvik dock att placera systemet nära större metallkonstruktioner; till exempel en metallvägg.

### 1. Anslut Set 840-TV till ett vägguttag

- Till att börja med, montera ihop nätadaptern. Välj en passande kontakt som används för vägguttag i ditt land. Tryck fast den i den lilla svarta boxen som heter: "SWITCHING POWER SUPPLY NT-13" tills den låser fast (med ett hörbart klick). Nu är nätadaptern färdig.
- Anslut adaptern till ett vägguttag och - i andra änden av sladden - anslut den lilla, gula, runda kontakten till den gula uttaget på baksidan av sändaren med markeringen "DC IN 13,5V".
- Sändaren är nu påslagen och en grön lampa tänds på framsidan. Om inte sändaren används inom 3 minuter kommer sändaren, och den gröna lampan, att åter stängas av .

### 2. Ladda stetoset-mottagaren

- Placera stetosetet i laddningsfacket ovanpå sändaren. Om det placeras på rätt sätt kommer laddningsblecken att få full kontakt, batterierna kommer att laddas och en röd lampa - alldeles under Sennheiser-logotypen på sändaren - kommer att tändas.
- Första gången måste stetosetet laddas ungefär 3 timmar. När batterierna är fulladdade skiftar lampans färg från rött till grönt. Nu kan man använda stetosetet ca 9 timmar innan det behöver laddas på nytt. För säkerhets skull bör stetosetet alltid förvaras i laddningsfacket ovanpå sändaren när det inte används, för att du ska vara säker på att det alltid är fulladdad när du behöver det. Det är inte möjligt att överladda batterierna.

### 3. Koppla Set 840-TV till din TV eller en annan ljudkälla

- Detta kan göras på olika sätt, men kom alltid ihåg att stänga av TV:n eller ljudkällan innan anslutning sker.
- Koppla den ena änden av ljudkabeln med blå minitelekontakter till hörlursuttaget på din TV. Den andra änden av kabeln kopplas till baksidan av sändaren, till det blå uttaget med beteckningen AUDIO".
- Om TV-uttaget är för stort bör du använda den större stereotele-adapttern. Den lilla kontakten stoppas in i bakre delen av den större kontakten.
- Sändaren kan även anslutas på annat sätt, till exempel genom att använda phono-kontakter eller SCART-kontakten (oftast placerad på baksidan av TV:n), det är dock ofta enklast att använda TV:ns hörlursuttag.
- En omkopplare på sändarens baksida markerad med "ST/MO" (stereo eller mono) erbjuder ett stereoalternativ. Set 840-TV måste i så fall vara kopplad till en stereo-TV och omkopplaren måste vara i ST-läget (mot den blå Audio-kontakten). Setet levereras i det läget från fabriken.
- En annan omkopplare, märkt: "CHANNEL", låter dig välja mellan tre olika kanalinställningar. Normalt fungerar dock den fabriksinställda kanalen utmärkt. Du behöver bara ändra kanal om brus och andra störningar skulle uppstå.

- Till sist; på baksidan av sändaren finns en ratt för att man ska kunna justera balansen mellan bas och diskant, i de fall man använder hörbarhetsförstärkningen (diskanthöjning), som beskrivs nedan. Du behöver en skruvmejsel för att kunna göra denna justering, men normalt är detta inte nödvändigt.
- Sätt på TV:n och vrid upp ljudvolymen till lämplig nivå.


#### 4. Att använda Set 840-TV systemet

- Sändaren startas automatiskt så snart TV:n försett den med en signal.
- Sätt på dig stetosetet (placera det i öronen som ett stetoskop). Mottagaren sätts automatiskt på när öronbyglarna förs isär. Stetosetet söker nu efter den kanal som sändaren använder. Om du nu hör TV-ljudet är allt bra. Om så inte är fallet, måste du trycka på CHANNEL-knappen på mottagarens baksida. Den söker då åter efter den kanal som sändaren använder. Du kanske behöver upprepa denna procedur tills den önskade kanalen funnits.
- Ljudnivån kan justeras med volymratten (0-6) under din haka.
- Om mottagaren inte får någon signal från sändaren kommer du att höra 6 korta ljudsignaler (pip). Kontrollera att sändaren är påslagen, att du är inom sändarens räckvidd och att sladden från TV:n är korrekt ansluten till sändaren.
- 2 längre ljudsignaler innebär att strömmen i det laddningsbara batteriet är på väg att ta slut.
- Vid behov kan man öka hörbarheten genom att använda den svarta knappen på sändaren (fram till på vänster sida). Den har en liten symbol i form av ett öra. Tryck på den knappen upprepade gånger tills ljudet låter bra för dig:
  - 1: Kompression (svaga partier i ljudet förstärks)
  - 2: Diskanthöjning
  - 3: Både kompression och diskanthöjning samtidigt
  - 4: Grundinställning (inget ljus)
- Slutligen justeras balansen mellan höger och vänster kanal med den lilla ratten på stetosetets baksida.

#### 5. Stäng av Set 840-TV

- Placera stetosetet i laddningsenheten ovanpå sändaren så batterierna kan laddas.
- Sändaren stängs av automatiskt efter 3 minuter, om TV:n stängs av.

Mycket nöje med Sennheiser Set 840-TV. Om du behöver mer detaljerade instruktioner, finner du dem i den bifogade handboken "*Wireless TV Listening System Set 840-TV*".

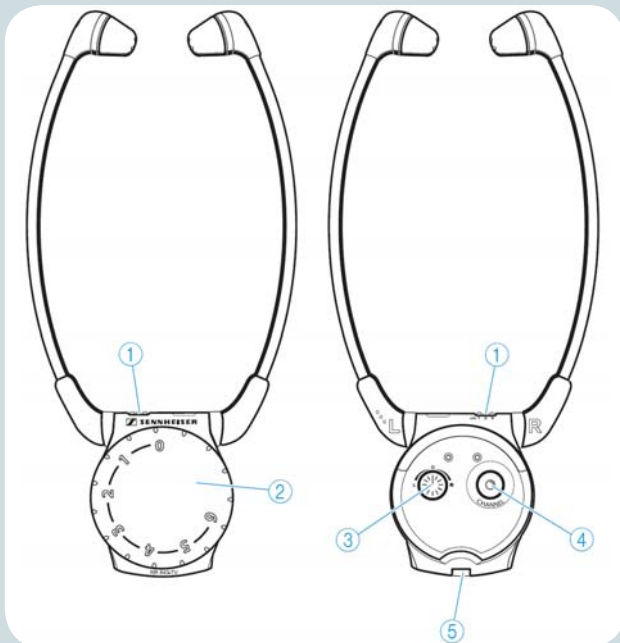

### Stetoset-mottagare

1. Kanalindikering
2. Volymkontroll
3. Balanskontroll
4. Kanalsökningsknapp
5. Batterifack

### Sändare

6. Laddningsfack för mottagare
7. Laddningsfack för laddningsbart extra-/reservbatteri
8. Laddningsindikering för laddningsbart extra-/reservbatteri
9. Laddningsindikering för mottagarens batteri
10. Spänningsindikering (lyser grönt när sändaren är "på")
11. "Hörbarhets"-knapp
12. Indikering för vald hörbarhetsnivå
13. Kontakt (blå markering) för anslutning av extern ljudkälla eller mikrofon
14. Stereo-/monoomkopplare (ST/MO)
15. Diskantkontroll
16. Kanalvalsomkopplare
17. Strömkontakt (DC) (gul markering) för anslutning av nätadapter

